



KIT

per somministrazione
intramuscolare e sottocutanea

Guida per la corretta somministrazione



Gentile paziente, questa è una guida illustrata per la corretta preparazione e somministrazione sottocutanea del farmaco che Le è stato prescritto dal suo Medico.

CONTENUTO

- 14 siringhe da 2 ml, Luer Lock Centr-
Fabbricante: B.Braun Melsungen AG-Melsungen  0123
- 14 aghi 21 G x 1 1/2" (0,8 x 40 mm)
Fabbricante: B.Braun Melsungen AG-Melsungen  0123
- 14 aghi 30 G x 1/2" (0,3 x 13 mm)
Fabbricante: B.Braun Melsungen AG-Melsungen  0123
- 14 tamponi per la pulizia della cute prima dell'iniezione. Solo per uso esterno.
Fabbricante: B.Braun Melsungen AG - Germany, B.Braun Medical AG - Switzerland

IL TRATTAMENTO PRESCRITTO RICHIEDE DELLE INIEZIONI RIPETUTE

Lei potrà eseguire la somministrazione sottocutanea seguendo le istruzioni del suo medico specialista.
Questo pieghevole la aiuterà ad eseguire correttamente la procedura.

Aghi e siringhe sono dispositivi medici  0123.
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE: le siringhe e gli aghi sono previsti solo per il monouso.
Non riutilizzare per evitare qualsiasi rischio di contaminazione.

TENERE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI.

Per l'acquisto in Farmacia



A 979114042



Caring Innovation

GUIDA PER LA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

La preparazione deve essere effettuata subito prima di eseguire l'iniezione. Nella preparazione dell'iniezione è importante garantire la massima pulizia.

Prima della procedura è necessario lavarsi bene le mani. **A**

Per la preparazione serve una superficie pulita. **B**



Collocare i seguenti articoli su una superficie ben pulita

1


- 1 flaconcino contenente il farmaco in soluzione iniettabile.
- 1 siringa sterile da 2 ml Luer Lock.
- 1 ago da 21 G (colore verde) per iniezione intramuscolare.
- 1 ago da 30 G (colore giallo) per iniezione sottocutanea.
- 1 tampone per la pulizia della cute prima dell'iniezione.

Preparazione del flaconcino e della siringa

2

Preparare il flaconcino del farmaco seguendo le istruzioni riportate nel foglietto illustrativo del farmaco. **C**

Decomprimere la siringa (spingendo lo stantuffo verso il basso) e inserire l'ago lungo di colore verde, senza rimuovere il cappuccio dall'ago. **D**

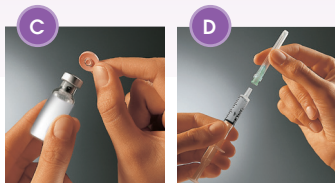

Riempimento della siringa

3

Rimuovere il cappuccio dall'ago e inserirlo nel centro del tappo di gomma. **E**

Con l'ago inserito capovolgere (a testa in giù) il flaconcino.

Verificare che l'ago sia a contatto con la soluzione.

Tirare delicatamente lo stantuffo per estrarre tutta la soluzione contenuta nel flaconcino. **F**

Assicurarsi che tutta la soluzione sia nella siringa. **G**

Rimuovere l'ago dal flaconcino.



Cambio dell'ago per l'iniezione

4

Mettere il cappuccio protettivo sull'ago lungo (verde) e poi rimuoverlo dalla siringa.

Togliere dalla confezione l'ago più corto (colore giallo) senza rimuovere il cappuccio dall'ago.

Inserire l'ago piccolo (colore giallo) nella siringa riempita con il farmaco e quindi rimuovere dall'ago il cappuccio di protezione. **H**



Eliminazione delle bolle d'aria

5


Tenere la siringa con l'ago piccolo (colore giallo) in verticale puntando verso il soffitto.

Picchiettare delicatamente la parete della siringa per concentrare le bolle d'aria presenti nella parte superiore. **I**

Premere lentamente lo stantuffo della siringa per eliminare le bolle d'aria.

L'aria sarà eliminata completamente quando una goccia di soluzione appare sulla punta dell'ago. **L**

La siringa è pronta per l'iniezione.

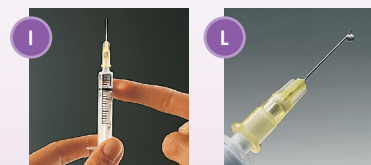

Iniezione sottocutanea


6

Il suo Medico o il personale sanitario le avranno indicato in quale parte del corpo può iniettare il farmaco.

Le zone più comuni sono le cosce o la parete addominale inferiore sotto l'ombelico, perché sono punti in cui è facile prendere la pelle con le dita.

Con il tampone imbevuto di disinfettante pulire delicatamente la zona in cui si praticherà l'iniezione e lasciar asciugare. **M**

Tenere la siringa con una mano.

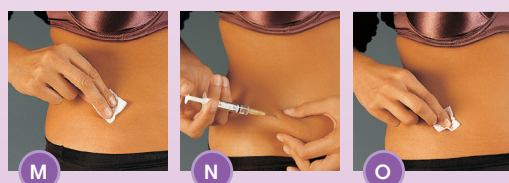

Utilizzare l'altra mano per prendere tra il pollice e l'indice un lembo di pelle nella zona in cui si praticherà l'iniezione sottocutanea. Con un movimento deciso, inserire completamente l'ago nella pelle, in modo da formare un angolo retto. Attenzione: il farmaco non deve essere iniettato direttamente in vena. **N**

Iniettare la soluzione premendo lo stantuffo con un movimento lento e costante finché tutta la soluzione sarà uscita dalla siringa. Iniettare tutta la soluzione prescritta.

Rilasciare la pelle ed estrarre delicatamente l'ago.

Disinfettare con movimenti circolari la zona dell'iniezione, utilizzando il tampone imbevuto di disinfettante. **O**

Smaltimento dei materiali

7

Terminata l'iniezione, tutto il materiale utilizzato e gli aghi devono essere smaltiti in un apposito contenitore.